



Данное руководство распространяется на модели **GK-40, GK-80, GK-120-1, GK-120-2, GK-120-3**

Компании **МАП Лтд (Россия)** и **SWG Europe Ltd. (Англия)** благодарят Вас за удачный выбор. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для ознакомления при появлении вопросов по работе оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Размеры (ДхШхВ), мм	Потребление Вт	Вес, кг	Площадь обслуживания	УФ-С, Вт	Длина волны, нм	Лампы, Тип
GK-40 S/St /W	465x210x175	50	2,5	40 м3/ч	5,5	253,7	G318 PL-L x1
GK-80 S/St /W	675x210x175	90	3,0	80 м3/ч	12,0	253,7	G336 PL-L x1
GK-120-1 S/St	540x160x315	80	4,6	60 м3/ч	4,7	253,7	G215 T8L x1
GK-120-2 S/St	540x160x315	100	4,5	80 м3/ч	12,0	253,7	G336 PL-L x1
GK-120-3 S/St	540x160x315	120	4,6	100 м3/ч	14,0	253,7	G225 T8L x2

МОДУЛИ СТЕРИЛИЗАЦИИ ВОЗДУХА серии **Germ-O-Kill** предназначены для обеззараживания воздуха в спортивных и бытовых помещениях, парикмахерских, лечебных учреждениях, станциях переливания крови, стоматологии, театрах и кино, школах, детских учреждениях, в цехах производственных предприятий, в магазинах, фармацевтической и пищевой промышленности и т.п. Конструкция приборов такова, что позволяет им работать в присутствии людей.

Серия включает в себя модели **GK-40, GK-80, GK-120-1, GK-120-2, GK-120-3**. Приборы могут крепиться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, отражатель может быть вогнутым и выгнутым. Обилие вариантов служит гарантией того, что приборы подойдут под любой интерьер. Модули выпускаются в корпусах из нержавеющей стали и из стали покрытой порошковой краской.

Комплект поставки.

- Стерилизатор воздуха **Germ-O-Kill** с кабелем питания – 1 шт.
- Монтажный комплект (2 винта с дюбелями) – 1 шт.
- Руководство по установке и эксплуатации – 1 шт.

Предупреждение - данное оборудование следует заземлять, подключая к 3-х проводной электрической сети.

ЭТИ ПРИБОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕНЫ И УСТАНОВЛЕНЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

УСТАНОВКА

GK-40 и GK-80 разработаны и предназначены для установки на стену.

Модуль **GK-40/80** следует установить в комнате на необходимой Вам высоте, но **НЕ МЕНЕЕ 2 метров** от пола.

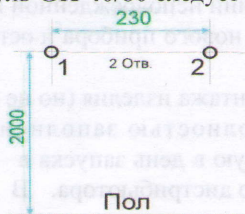


Рис. 1

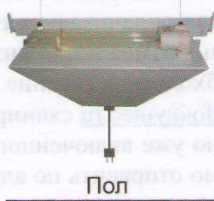


Рис. 2

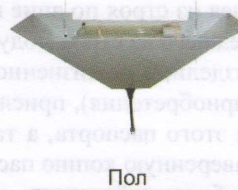


Рис. 3

Убедитесь что поверхность, на которую Вы будете устанавливать модуль ровная и позволяет пропускать вдоль нее потоки воздуха.

1. Отметьте два отверстия, как это показано на (рис. 1). Для модели **GK-40** это **220** мм, а для модели **GK-80** это **430** мм.
2. Просверлите отверстия в стене, вставьте в них дюбели, имеющиеся в монтажном комплекте, закрутите в них винты.
3. Установите рабочий (с лампой) блок стерилизатора на стену, надев его на предварительно вкрученные в стену винты (рис. 2). Вставьте в специальное гнездо в нижней части установленного рабочего модуля кабель питания.
4. Наденьте на выступающие держатели рабочего блока стерилизатора экранирующую крышку (рис. 3). Без экранирующей крышки модуль включать категорически **запрещается!!!**
5. Во время работ не разрешается трогать лампу руками. Убедитесь, что прибор крепко закреплен в установленном положении.

GK-120-(1,2,3) может быть установлен на любой высоте. Как в горизонтальном, так и в вертикальном положении в зависимости от ситуации и дизайна помещения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Включите Ваш модуль **Germ-O-Kill** в розетку. Когда над модулем Вы увидите свет, это будет означать, что к прибору подается питание. Ваш модуль будет эффективно стерилизовать воздух в помещении в пределах той площади, которая указана в таблице. Если Ваше помещение больше, то нужно пропорционально увеличить количество модулей.

Для эффективного уничтожения микроорганизмов, модуль **Germ-O-Kill** использует бактерицидную лампу стандартного или небьющегося (безосколочного) исполнения с диапазоном излучения UV-C, которая находится внутри прибора.

При работе лампа постоянно светится, но после 9-12 месяцев использования она теряет свою эффективность и нуждается в замене. Новую лампу можно брать руками только в перчатках из ткани, защищающих от попадания жира или грязи на стекло лампы, что может приводить к снижению эффективности эффекта стерилизации.

Замена ламп.

ЗАМЕНА бактерицидной UV-C ЛАМПЫ

Перед сменой ламп, обязательно удостоверьтесь в том, что прибор отключен от сети.

Для обеспечения максимально эффективной работы прибора, УФ лампы необходимо менять каждые 9-12 месяцев. Всегда удостоверьтесь в том, что лампы, которые вы устанавливаете взамен старых, совместимы с нашим оборудованием.

Для того чтобы сменить лампы...

1. Снимите прибор со стены и все операции проводите только на столе.
2. Снимите с прибора плафон внешний (у GK-40, GK-80) или полукруглый отражатель, потянув его с одной стороны пальцами на себя, приподняв вверх и затем толкнув от себя. См. фото.
3. Поверните передний отражатель вначале направо, а затем толкните вперед высвобождая его от защелок.
4. У моделей GK-40, GK-80 потяните лампу в сторону, у GK-120-2 просто надавите на красную кнопку держателя лампы. Лампа легко освободится. Взяв лампу одной рукой за основание, другой вытащите лампу из крепления.
5. У моделей GK-120-1 и GK-120-3 поверните каждую из ламп вокруг оси на 90 градусов и затем потяните их вверх. Лампы легко снимутся.
6. Установите новые лампы в обратной последовательности.
7. Установите на место полукруглый отражатель или плафон внешний (у GK-40, GK-80).



ОЧИСТКА

ПЕРЕД ЛЮБЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРИБОРА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА НЕГО НЕ ПОДАЕТСЯ ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ.

Внешняя отделка модуля *Germ-O-Kill* допускает влажную санитарную обработку наружных поверхностей. Прибор следует тщательно протереть влажной тряпкой, удаляя все загрязнения с поверхности прибора. Убедитесь в том, что прибор совершенно сухой, перед включением в сеть.

Гарантия.


Ваш модуль *Germ-O-Kill* имеет законную гарантию 1 год (за исключением ламп). Если в течение 12 месяцев в модуле будет обнаружен дефект, то модуль будет заменен. Замена вышедшего из строя прибора может быть так же произведена по взаимному согласию в любое время его эксплуатации, не зависимо от даты приобретения. Неисправный прибор должен быть отправлен поставщику для выяснения причины его выхода из строя. Если это окажется производственный брак, рабочий модуль остается у пользователя безвозмездно. При наличии неповрежденной пломбы. Если прибор вышел из строя по вине пользователя, то он оплачивает только разницу в цене нового прибора и остаточной стоимостью вышедшего из строя модуля. На эту модель **возможна пожизненная** гарантия.

Для получения изделия пожизненной гарантии необходимо в течение 10 дней от даты монтажа изделия (но не позднее 30 дней от даты приобретения), прислать на E-mail: info@yutec.ru сканированную копию полностью заполненного последнего листа этого паспорта, а так же фотографию уже включенного изделия, сделанную в день запуска в эксплуатацию. Заверенную копию паспорта необходимо отправить по адресу эксклюзивного дистрибьютора. В противном случае будет действовать обычная законная гарантия!

Гарантия распространяется только на те модули, в которых использовались оригинальные запасные части фирмы-производителя компании YUTEC.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛАМПЫ, А ТАКЖЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА МОДУЛИ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И/ИЛИ НАРУШЕНИЕ ПЛОМБЫ.

Серийный номер	Дата приобретения					« ____ » ____ 201_г.
Наименование дилера						
Тел. и E-mail дилера						
Пользователь прибора						
Модель	GK-40 S/St/ W	GK-80 S/St/ W	GK-120-1 S/St	GK-120-2 S/St	GK-120-3 S/St	

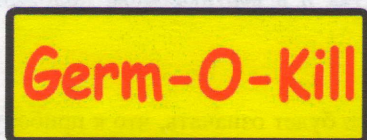

**Эксклюзивный дистрибьютор
в России и СНГ**

ЗАО «МАП Лтд»

(495) 642-62-67 Москва
(865) 236-41-25 Ставрополь

WWW.GermoKill.RU
WWW.MyxNet.RU
E-mail: INFO@YUTEC.RU

Ул. СНИИСХ, д. 21, г. Михайловск
Ставропольский край, РОССИЯ, 356241